

Port d'un masque et appareil de protection respiratoire

Masque CHIRURGICAL



1- Déplier le masque, le tenir par le haut (baguette) et si masque à élastiques, passer les doigts dans les élastiques



2- Repérer la face à appliquer sur la bouche (face ayant les plis dirigés vers le haut)



3- Positionner le masque sur le nez et la bouche en incluant le menton



4- Accrocher le masque :
-si masque à élastiques : passer les élastiques derrière les oreilles
-si masque à liens : positionner le 1er lien sur le haut de la tête et le 2nd lien sous les oreilles au niveau de la nuque



5- Modeler la barrette et l'ajuster au contour du nez avec vos deux index



6- Assurer l'étanchéité du masque :
Le nez, la bouche et le menton doivent être recouverts

Appareil de Protection Respiratoire (APR) FFP2



1- En tenant de chaque côté le masque, l'ouvrir en pliant légèrement la barrette, et saisir les 2 liens élastiques



2- Séparer les 2 liens à l'aide des 2 index



3- Passer le premier lien élastique derrière la nuque
Positionner le menton dans le masque



4- Passer le second lien au-dessus de la tête



5- Positionner le 1er lien sur le haut de la tête et le 2nd lien sous les oreilles au niveau de la nuque



6- À l'aide des 2 index pincer la barrette située sur le haut pour ajuster le masque et s'assurer de son étanchéité en réalisant le test en pression négative*

UN MASQUE NON POSITIONNE EST UN MASQUE A JETER !

Réaliser une Hygiène Des Mains par friction hydro alcoolique avant et après le port d'un masque et d'un APR

***TEST EN PRESSION NEGATIVE : inspirer et retenir sa respiration quelques secondes ; l'APR doit rester légèrement plaqué au visage**